

ST7000

PCA intelli

Bomba de Infusão de Seringa



LINHA

ST7000 PCA intelli

Bomba de infusão de seringa para **analgesia controlada pelo paciente**

- De acordo com **ABNT NBR IEC 60601-1***, **ABNT NBR IEC 60601-2-24**** e demais normas aplicáveis conforme Instrução Normativa ANVISA


Inovadora com **7 protocolos**

Contínuo




Manutenção contínua durante a infusão e sem dose de bolus

Contínuo + Bolus

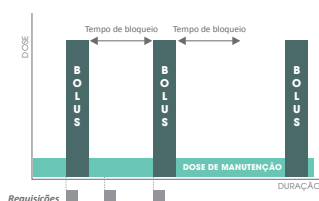


Manutenção contínua durante a infusão e bolus requisitado pelo paciente

Somente Bolus

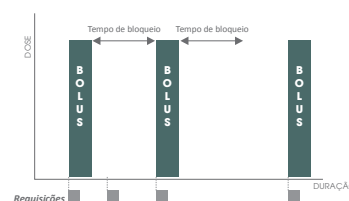


Dose administrada a cada requisição do paciente

Bolus + Manutenção Temporária

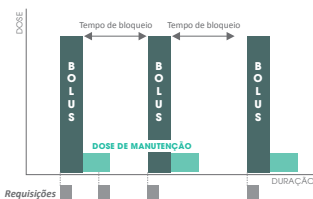


Dose de bolus requisitada, seguida por uma de manutenção temporária

Bolus + Manutenção Decrescente

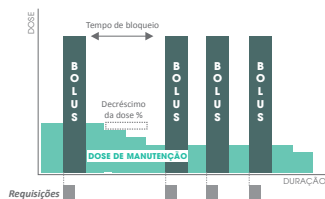


Valor decrescido da dose de manutenção, inexistindo requisições do paciente em determinado período

Bolus + Manutenção Sob Demanda

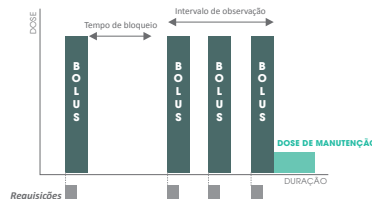

Manutenção temporária iniciada após requisições de bolus, pelo paciente, dentro de intervalos

Bolus + Bolus Intermitente

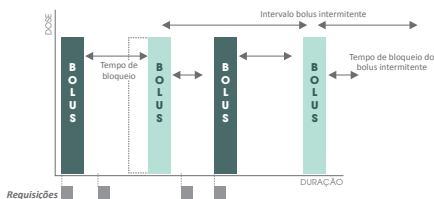

Bolus intermitente administrado com intervalos pré-definidos e bolus administrado a cada requisição do paciente

Customize a terapia do paciente utilizando biblioteca de drogas parametrizadas ou incluindo novos fármacos

Morfina • Metadona • Fentanil • Ropivacaína • Bupivacaína • Tramadol • Clonidina • Dexmedetomidina

*ABNT NBR IEC 60601-1: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial.

**ABNT NBR IEC 60601-2-24: Equipamento eletromédico - Parte 2-24: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de bombas de infusão e de controladores de infusão.

Conforto, Segurança e Precisão

no manejo da dor aguda controlada pelo paciente



Capa protetora transparente



Chave de segurança



Versatilidade

9 modos de programação:
permite outras terapias no
mesmo equipamento



**Bloqueio
do teclado
por senha**

**Botão anatômico
de bolus**



Produto fornecido com **código UDI**
(identificação única para produtos da saúde)

Compatível com o software SamINTELLI® de criação e gestão de bibliotecas inteligentes de drogas.

APRESENTAÇÕES

MODELO	DESCRIÇÃO
PB009201	Bomba de Infusão de Seringa ST7000 PCA intelli WiFi
PB008121	Bomba de Infusão de Seringa ST7000 S PCA intelli WiFi

Modelos "S": equipamentos para uso com dispositivos de infusão dedicados

Consulte a linha de dispositivos de infusão Samtronic:
seringas, extensores e tampas ocluseras



www.samtronic.com.br
contato.sp@samtronic.com.br



Acesse
o canal
do **YouTube**
da Samtronic

MATRIZ:

R. Venda da Esperança, 162, Bairro Socorro, São Paulo, SP
Fone: +55 11 2244-7750

UNIDADE FABRIL:

R. das Indústrias, 334, Distrito Industrial IV, Bragança Paulista, SP
Fone: +55 11 2490-1910

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:

R. Domingos Jorge, 261, Bairro Vila Socorro, São Paulo, SP
Fone: +55 11 2244-7835

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO NORDESTE:

Rodovia BR 101 Sul, 3791, M 8B, Cabo de Santo Agostinho, PE
Fone: +55 81 3092-3384

Imagens meramente ilustrativas. Verifique se os produtos estão registrados em seu país. As instruções de uso podem variar de acordo com a localidade. Entre em contato com a Samtronic ou representante autorizado para mais informações. Samtronic e suas marcas registradas são propriedades da Samtronic Indústria e Comércio Ltda. Todos os direitos reservados.



Resp. Técnica: Fabianna Rondinelli CRF-SP: 23913

Anvisa ST7000: 10188530070